

Assay Performance Data

Naam assay:	CA 125 in serum
Traceerbaarheid:	
Gekalibreerd naar	Referentie Fujirebio Diagnostic Standard, Inc. Maintained
Referentie-interval of afkappingen (kU/l)	
Herkomst referentiewaarden	< 35 Na de menopauze of hysterectomie wordt de bovengrens < 30 Bron: Bijsluiter Abbott
Stabiliteit monster	
Kamertemperatuur 4 °C -20 °C	Ja/ Nee , termijn serum 3 dagen. Ja/ Nee , termijn serum 5 dagen. Ja/ Nee , termijn serum 3 maanden. Bron: Quality of Diagnostic Samples (3rd completely revised edition 2010)
Detectielimieten (kU/l)	
LoD (Limit of Detection)	0.3
LoQ (Limit of Quantitation)	0.6
Imprecisie (kU/l)	
Concentratie (41.2)	CV (%):2.3
Concentratie (318)	CV (%):2.8
Meetbereik (kU/l)	
Meetbereik	1.0-1000 Eventueel: Verdunnen mogelijk Uitslagen < 1.0 worden als zodanig gerapporteerd
Extern QC programma	
(Inter)nationaal extern QC programma	RfB (TM)

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ingevuld door: EH	Datum: 30-01-2023
-------------------	-------------------