

Assay Performance Data

Naam assay:		Thyreoglobuline in serum
Traceerbaarheid:		
Gekalibreerd naar	Certified Reference Material (CRM) 457	
Referentie-interval of afkapgrenzen (ng/ml)		
Herkomst referentiewaarden	Indien antistoffen tegen thyreoglobuline eveneens aantoonbaar zijn wordt de thyreoglobuline uitslag onbetrouwbaar. < 1.0 (na chirurgie na 131-I ablatie) Grijs gebied: 0.3 - 1.0 Bron: Eigen onderzoek (P126 ablatie studie)	
Stabiliteit monster		
Kamertemperatuur 4 °C -20 °C	Ja/ Nee ; termijn serum 8 uur. Ja/ Nee ; termijn serum 24 uur. Ja/ Nee ; termijn serum 1 maand. Bron: Meest recente bijsluiter.	
Detectielimieten (ng/ml)		
LoD (Limit of Detection) LoQ (Limit of Quantitation)	0.09 0.17	
Imprecisie (ng/ml)		
Concentratie (0.21) Concentratie (0.99) Concentratie (48.4)	0.21 ng/mL CV (%): 14 0.99 ng/mL CV (%): 7.7 48.4 ng/mL CV (%): 2.2	
Meetbereik (ng/ml)		
Meetbereik	0.09 tot 200 Eventueel: Mogelijkheid tot verdunnen. Uitslagen < 0.09 worden als zodanig gerapporteerd	
Extern QC programma		
(Inter)nationaal extern QC programma	RfB (TM)	
Indien niet beschikbaar, alternatieve aanpak	n.v.t.	
* Doorhalen wat niet van toepassing is.		
Ingevuld door: EH		Datum: 28-08-2026